Respiprogram entraînement respiration



Art: 9011003 | Marque: MEDINET

Gayerimage or type unknown

Informations sur le produit

POUR UN USAGE INDIVIDUEL RESPIPROGRAM est un entraîneur **respiratoire spécialement** conçu pour **favoriser une inspiration profonde** :

- respirer profondément permet d'une part de dilater les alvéoles pulmonaires.
- et d'autre part d'éliminer les mucosités des voies respiratoires.

INDICATIONS DU RESPIPROGRAM

• prévention des complications postopératoires comme une atélectasie, une pneumonie ou un dysfonctionnement pulmonaire.

COMMENT UTILISER RESPIPROGRAM?

- après expiration, laissez votre patient inspirer profondément pour qu'il atteigne que deux ou trois balles 'montent'.
 - inspirer aussi longtemps que possible.
- retirer l'embout buccal et expirer lentement par le nez.
- relâcher après chaque inspiration profonde.
- répéter le processus (aussi souvent que vous l'indiquez).

SPÉCIFICATIONS

- les graduations sur les cylindres sont uniquement présentes à titre indicatif.
- un filtre garantit qu'aucune particule dangereuse n'est inspirée.
- peut être entièrement démonté pour nettoyage.
 - nettoyer à l'eau chaude (40°).
 - ensuite laisser sécher.

EMBALLAGE

• RESPIPROGRAM est livré avec un connecteur doté d'un filtre, ainsi qu'avec un tube doté d'un embout buccal.

ATTENTION : RESPIPROGRAM n'est pas un dispositif destiné à mesurer le volume pulmonaire ! RESPIPROGRAM convient uniquement pour un usage individuel. Combinable avec l'entraîneur respiratoire RESPILIFT (art. 901.1004). De cette façon, il est possible d'inspirer et d'expirer consécutivement contre résistance.