

Blackroll Compression Boots - small

gymna

Art: 577070 | Merk: [BLACKROLL](#)



Productinformatie

Compressie voor de benen na een zware training of werkdag.

De **BLACKROLL COMPRESSION BOOTS** bevorderen de bloedsomloop en helpen om **pijn en zwelling te verminderen, spieren te ontspannen**, en zware benen te verlichten. De zachte druk en masserende werking van de compressielaarzen zorgen voor ontspanning en het verminderen van stress.

Ideaal voor uw patiënten thuis!

De Blackroll Compression Boots zijn bedoeld voor RECOVERY, het zijn GEEN therapie-hulpmiddelen.

SNELLER HERSTEL, BETERE MOBILITEIT

- Bij de productie van energie worden metabolische afvalstoffen - zoals lactaat - geproduceerd in het lichaam. Deze moeten worden **afgevoerd via het bloed en het lymfestelsel**. Tijdens een compressiemassage worden ze uit de spieren gespoeld waardoor het **herstelproces versnelt**.
- De compressie bevordert de bloedcirculatie in voeten en benen en **verbetert de mobiliteit** direct na gebruik.

OVERAL TE GEBRUIKEN

- Dankzij het compacte en lichte ontwerp met interne buizen zijn de compression boots overal te gebruiken.
- De compressielaarzen zijn makkelijk mee te nemen in hun praktische opbergtas.

DE VOORDELEN VAN COMPRESSION BOOTS OP EEN RIJTJE

- Verminderen van spierspanning en bevorderen van bloedcirculatie
- Minder spierpijn en snellere regeneratie
- Ondersteuning van lymfestroom
- Compact ontwerp dankzij interne slangen en geïntegreerde compressor
- Compressiecycli van 60 seconden
- 3 programma's* met 5 drukniveaus (40- 120 mmHg)
- Continue massage dankzij de 5 overlappende luchtkamers

**zie bijlage: vullen van de luchtkamers*

VIND DE JUISTE MAAT

- Voor de beste pasvorm van de compression boots raden wij aan om de binnenlengte van de benen te meten.
- Ga rechtop tegen een muur staan en klem een voorwerp (bijvoorbeeld een boek) tussen de benen.
- Meet nu de lengte van de vloer tot de bovenrand van het voorwerp en kies dan de juiste maat :
 - binnenbeenlengte < 81 cm = maat S (840 x 330 x 120 mm, dijomtrek = tot 65 cm)
 - binnenbeenlengte 81-88 cm = maat M (940 x 380 x 140 mm, dijomtrek = tot 75 cm)
 - binnenbeenlengte > 88 cm = maat L (1020 x 380 x 150 mm, dijomtrek = tot 75 cm)

HOE TE GEBRUIKEN?

- In het algemeen gebruikt men de compressie boots het beste liggend of zittend.
- Idealiter liggen de voeten niet lager dan het bekken, zodat de boots niet tegen de zwaartekracht in hoeven te werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Batterij: oplaadbare en verwijderbare 1.000mAh lithium-ion batterij
- Opladen: USB-C oplaadaansluiting
- Oplaadtijd batterij: 1,5 uur
- Druk: 40-120 mmHg
- Stand-by: werkt ca. 60 min (bij gemiddeld drukniveau)
- Geluidsniveau: ≤ 55 dB
- CE gecertificeerd

Inhoud van de doos: 2 x COMPRESSIE BOOT - 2 x batterij - 1 x opbergtas - 1 x USB-C oplaadkabel met dubbele connector - 1 x handleiding.